

## Kit Hygiène Value Pack

Kit Hygiène Value Pack Elacin pour un nettoyage en profondeur de vos protections

Ce kit est composé des produits suivants :


- + 1 outil d'extraction des filtres
- + 1 gobelet
- + 1 poire soufflante
- + 12 pastilles de nettoyage
- + 1 Kit Hygiène pour un entretien quotidien de vos protections :
  - 1 outil brosse avec curette
  - 1 tissu de nettoyage (pour le nettoyage quotidien et mensuel)
  - 2 sprays
  - 4 goupillons
  - 1 manuel d'utilisation



Nous vous recommandons de procéder, en plus du nettoyage simple quotidien, à un nettoyage mensuel en profondeur de vos protections auditives.

Pour ce faire, il est recommandé de retirer les filtres (excepté Elacin ER) à l'aide de l'outil d'extraction. Puis, placez les protections dans le gobelet avec de l'eau et une pastille de nettoyage. Laissez agir une heure, puis rincez les protections avec de l'eau propre.

Séchez ensuite la partie extérieure des protections avec le tissu fourni et utilisez la poire soufflante pour sécher le perçage des protections. Ce n'est que lorsque le perçage des protections est totalement sec que vous pouvez remettre les filtres dans les bouchons et les ranger dans leur étui.

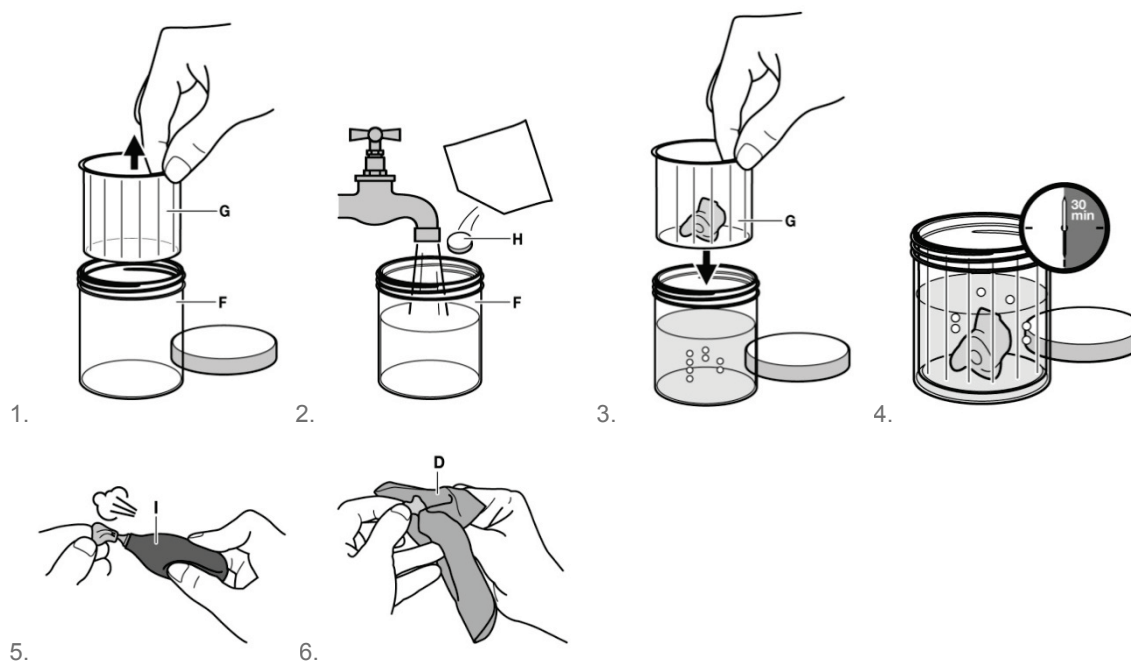

Vous trouverez plus d'informations sur le nettoyage de vos protections auditives et l'utilisation des produits de nettoyage dans le manuel d'utilisation.